


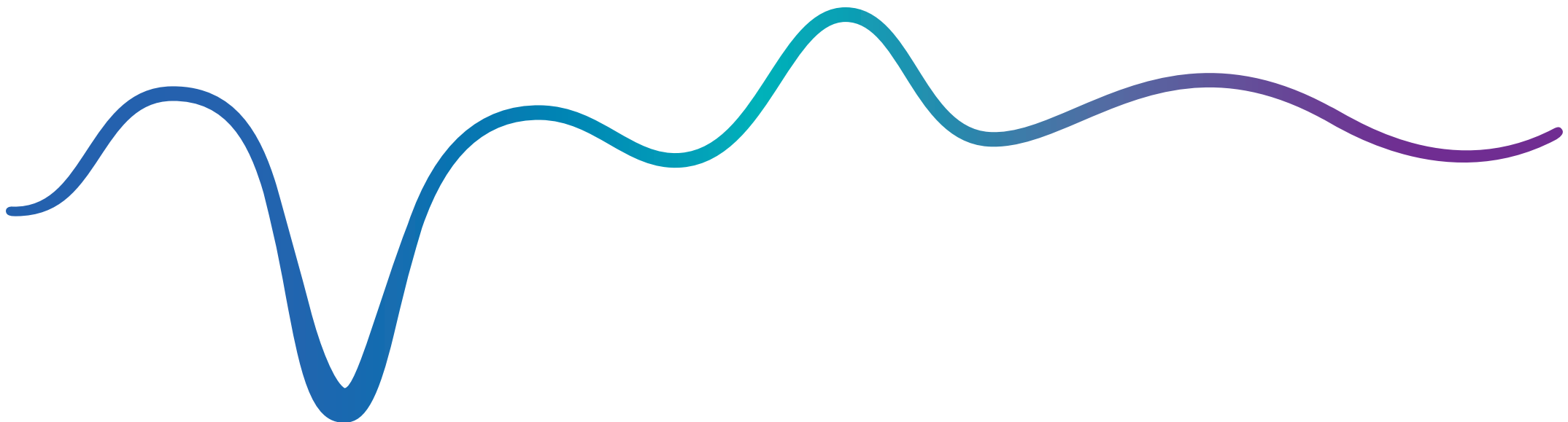

CGM Remote Monitoring

Mobiilisovelluksen käyttöopas Bruksanvisning för mobilapp



Sisällysluettelo | Innehållsförteckning


Suomi	Mobiilisovelluksen käyttöopas.....	5
Svenska	Bruksanvisning för mobilapp	19

The logo for eversense NOW features a stylized wave graphic above the text. The wave is composed of several segments in shades of blue, teal, and purple. The text 'eversense' is in a dark blue sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®) and 'NOW' in a purple sans-serif font.

eversense[®] NOW

CGM Remote Monitoring

Mobiilisovelluksen käyttöopas

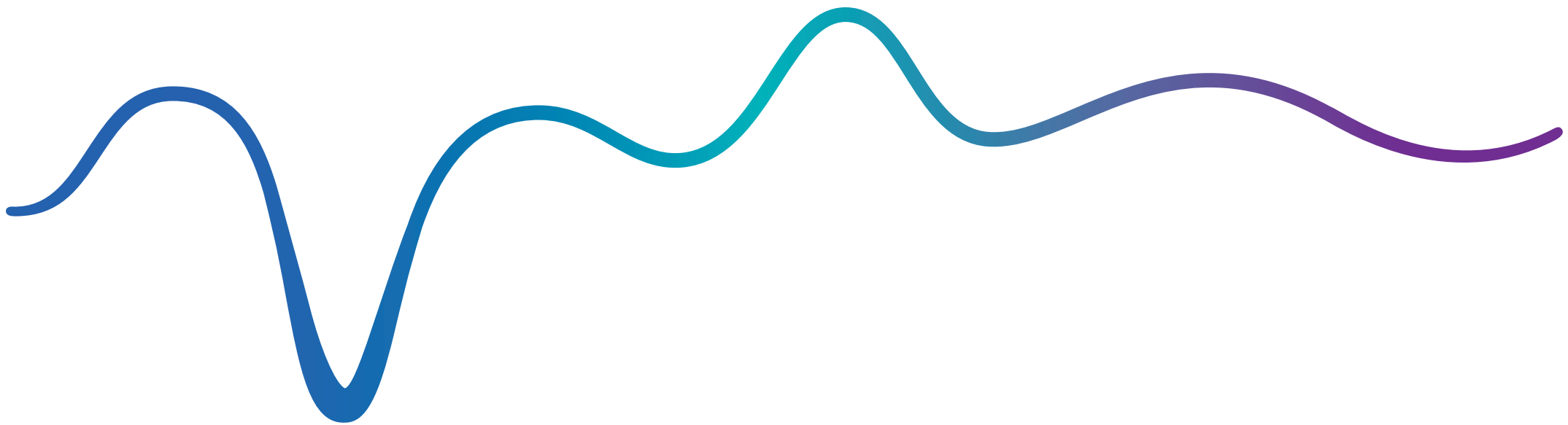

Eversense NOW – Käyttöopas | **mmol/L**

Etäseuranta Eversense CGM -järjestelmän ja Eversense NOW -sovelluksen avulla

Eversense CGM -sovelluksessa on valinnainen etäseurantatoiminto. Toiminto mahdollistaa Eversense CGM -tietojen katselemisen toissijaisella näytöllä Eversense NOW -mobiilisovelluksen avulla.

Käyttötarkoitus

Eversense NOW -sovellus on tarkoitettu toissijaiseksi näytöksi Eversense CGM -käyttäjiltä saatujen glukoositietojen ja varoitusten katselua varten.

Vasta-aiheet

Noudata klinikan ohjeita ja asianmukaisia muiden laitosten ohjeita, jotka koskevat mobiililaitteiden käyttöä magneetti- tai TT-kuvauksissa sekä samassa tilassa muiden toimenpiteiden laitteiden kanssa.

Riskit

Glukoositietoja ei ehkä voida aina lähettää Eversense NOW -sovellukseen. Jos et saa glukoositietoja Eversense CGM -käyttäjältä, et voi auttaa häntä korkean tai matalan glukoosiarvon tapauksessa. Etäseurantatoiminto mahdollistaa tietojen näyttämisen toissijaisella näytöllä. Se ei ole reaaliaikainen etäseurantajärjestelmä.

Eversense CGM -käyttäjillä ei ehkä ole aina käytössään tiedonsiirron edellyttämää yhteyttä, kuten internet-, Wi-Fi-, 3G-, 4G- tai LTE-yhteyttä. Jos sinulla tai Eversense CGM -käyttäjällä ei ole internet-yhteyttä, et voi katsella käyttäjän glukoositietoja. Tiedot eivät ehkä näy, jos mobiililaitteissa, langattomassa internet-yhteydessä, tiedonsiirrossa tai Eversense Data Management System (DMS) -järjestelmässä on jokin ongelma tai jos CGM-käyttäjän älylähetin on mobiililaitteen kantaman ulkopuolella tai latauksessa. Eversense-käyttäjän ei pidä laskea sen varaan, että seuraat hänen glukoositietojaan jatkuvasti ja voit auttaa häntä korkean tai matalan glukoositason tapauksessa.

Edut

Eversense CGM -järjestelmän käyttö yhdessä Eversense NOW -etäseurantasovelluksen kanssa tuo CGM-järjestelmän käyttäjille lisää mielenrauhaa, kun he tietävät, että muutkin henkilöt näkevät heidän CGM-tietonsa.

Varoituksia:

- Eversense NOW -sovelluksessa näkyviä glukoositietoja ei saa käyttää hoitopäätösten perustana. Eversense NOW -sovellus on Eversense CGM -tietojen toissijainen näyttötapa. Sitä ei tule käyttää Eversense CGM -järjestelmän ensisijaisen näytön sijasta. Eversense CGM -käyttäjien tulee käyttää hoitopäätösten tekemiseen aina verensokerimittarista saatuja verensokeriarvoja. Sensorin glukoosiarvon käyttäminen hoitopäätöksen tekemiseen voi johtaa korkeaan tai matalaan verensokeritasoon.
- Eversense CGM -käyttäjien ei pidä laskea sen varaan, että heidän glukoositasojaan etäseurannan avulla seuraavat henkilöt ilmoittavat heille korkeasta tai matalasta glukoositasosta.

Tärkeät huomautukset:

- Eversense NOW -mobiilisovellus ei korvaa lääkärin ohjaamaa asianmukaista seurantaa.
- Jos Eversense CGM -käyttäjä ei käytä automaattista synkronointia (toiminto, joka mahdollistaa tietojen automaattisen lähetyksen Eversense NOW -sovellukseen), et ehkä voi nähdä hänen korkean tai matalan glukoositason trendejään ja tapahtumiaan.
- Jos sinulla tai Eversense CGM -käyttäjällä ei ole internet-yhteyttä tai CGM-käyttäjän mobiililaitteen virta on katkennut akun tyhjenemisen vuoksi, hänen Eversense CGM -tietojaan ei voida näyttää Eversense NOW -sovelluksessa.
- Jos mykistät mobiililaitteesi äänet, et kuule seuraamiisi CGM-tietoihin liittyviä äänivaroituksia Eversense NOW -sovelluksessa.
- Jos Eversense CGM -käyttäjä asettaa tilakseen ”Offline”, et saa hänen CGM-tietojaan Eversense NOW -sovellukseen.
- Eversense NOW -sovellus ei kommunikoi suoraan Eversense-sensorin ja/tai Eversense-älylähettimen kanssa.
- Eversense NOW -sovellus ei voi muuttaa Eversense CGM -sovelluksen asetuksia.
- Jos et salli ilmoituksia Eversense NOW -sovelluksesta, et voi saada glukoositasoon liittyviä varoituksia Eversense CGM -käyttäjiltä.
- Jos mobiililaitteesi on asetettu Ei saa häiritä -tilaan, et kuule Eversense NOW -sovelluksen ilmoitusääniä.

Eversense NOW -sovelluksen käyttäminen

Tässä käyttöoppaassa neuvotaan Eversense NOW -sovelluksen käyttö Eversense CGM -järjestelmän käyttäjien glukoositietojen etäseurantaan.

Kiitos, että latsit Eversense NOW -mobiilisovelluksen. Eversense NOW mahdollistaa sinulle Eversense CGM -järjestelmän käyttäjien glukoositietojen etäseurannan.

Tärkeä huomautus: Eversense NOW -etäseurantasovellus ei korvaa Eversense CGM -järjestelmän sovelluksen ensisijaista näyttöä tai lääkärin ohjaamaa asianmukaista seuranta.

Järjestelmävaatimukset

- Eversense CGM -sovellus, joka ladataan mobiililaitteeseen Apple® App Store -sovelluskaupasta
- Yhteensopiva Apple® iPhone® tai iPod® tai iPad® (iOS-versio 8.0 tai uudempi)
- Yhteensopivien laitteiden luettelo on osoitteessa www.eversenseddiabetes.com.

Huom.: Eversense NOW -sovelluksen lataamiseen ja etänä näytettävien glukoositietojen vastaanottamiseen tarvitaan langaton internet-yhteys. Jos Eversense CGM -käyttäjä on poistanut automaattisen synkronoinnin käytöstä, hänen glukoosiarvonsa eivät näy Eversense NOW -sovelluksessasi.

Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja tietosuojakäytäntö

Eversense NOW -sovelluksen uusin loppukäyttäjän lisenssisopimus ja Eversense NOW -sovelluksen tietosuojakäytäntö säätelevät Eversense NOW -sovelluksen käyttöä. Nämä asiakirjat päivitetään säännöllisesti ja julkaistaan osoitteessa www.eversenseddiabetes.com.

Jailbroken-laitteet

ÄLÄ käytä Eversense-sovelluksia jailbroken-iPhone- tai iPod-laitteissa. Jailbroken-laitteet eivät takaa hyväksyttävää turvallisuus- ja tarkkuustasoa, ja Senseonics ei hyväksy niiden käyttöä.

Asiakaspalvelu ja -tuki

Jos tämän käyttöoppaan tiedoissa on jotain, jota et ymmärrä, katso paikallisen jälleenmyyjän yhteystiedot takasivulta.

Eversense-piiriin liittyminen

Eversense-piiri tarkoittaa niiden henkilöiden ryhmää, jotka voivat seurata tietyn Eversense CGM -käyttäjän glukoositietoja ja glukoosiin liittyviä varoituksia. Liittyäksesi piiriin sinun on hyväksyttävä Eversense CGM -käyttäjältä sähköpostitse saatu kutsu, luotava tili Eversense DMS -verkkosivustolla ja ladattava Eversense NOW -mobiilisovellus.

Eversense DMS -ohjelma on Eversense CGM -järjestelmän kanssa yhteensopiva verkkopohjainen sovellus, joka mahdollistaa historiallisten glukoositietojen ja raporttien katselun ja auttaa tunnistamaan niistä glukoositason trendejä, jotka voivat auttaa diabeteksen hallinnassa. Eversense DMS -ohjelma mahdollistaa myös tilin luomisen, jotta voit katsella glukoositietoja etänä Eversense NOW -sovelluksen avulla. Glukoositietoja ei ole mahdollista katsella etänä Eversense DMS -ohjelmassa. Saat lisätietoja Eversense DMS -ohjelmasta osoitteesta www.eversenseddiabetes.com.

Eversense-piirin liittymiskutsun hyväksyminen

Eversense-piiri on niiden henkilöiden ryhmä, jotka Eversense CGM -käyttäjä on kutsunut katselemaan etänä omia glukoositietojaan ja glukoosiin liittyviä varoituksiaan.




1. Saat sähköpostitse kutsun ("Glukoositietojen katselupyynnö") liittyä Eversense CGM -käyttäjän piiriin.

Huom.: Jos odotat kutsua, mutta et näe sitä Saapuneet-kansiossasi, tarkista Roskaposti- ja Roskakori-kansiosi.

2. Klikkaa linkkiä sähköpostiviestissä.

3. Kirjaudu sisään Eversense-tiliisi.

Huom.: Eversense NOW -sovellus sallii korkeintaan kymmeneen Eversense-piiriin liittymisen. Jos sinut kutsutaan liittymään yhdenteentoista piiriin, saat sähköpostiviestin, jossa sinua kehoitetaan poistamaan itsesi jostain piiristä, jotta voit lisätä uuden piirin.

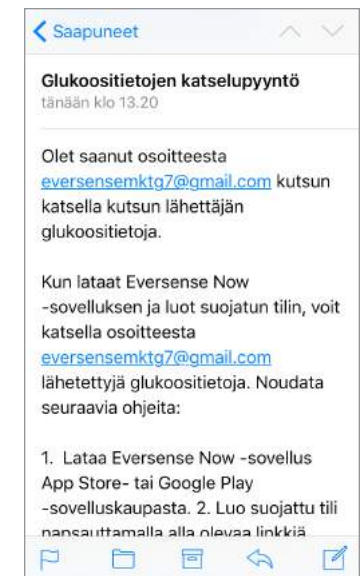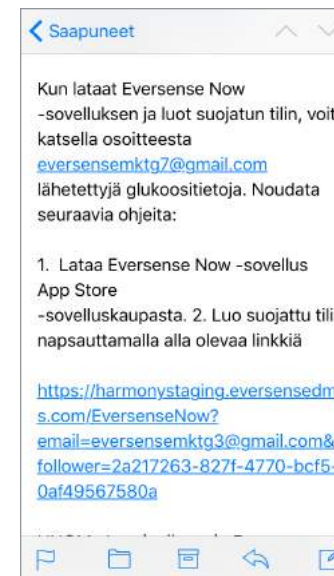
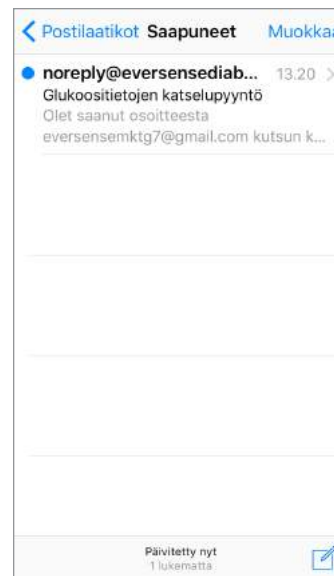


Eversense NOW -sovelluksen lataaminen

1. Siirry Apple App Storeen ja etsi sovellus kirjoittamalla hakukenttään ”Eversense NOW”.
2. Napauta Eversense NOW -kuvaketta ja lataa ja asenna sovellus älylaitteeseesi.
3. Kun näet sovelluksen kehoitteen, napauta ”Salli”, jotta voit alkaa vastaanottaa glukoositasoon liittyviä varoituksia luettelossasi olevilta Eversense CGM -käyttäjiltä.




Tärkeä huomautus: Jos et salli ilmoituksia Eversense NOW -sovelluksesta, et voi saada glukoositasoon liittyviä varoituksia Eversense CGM -käyttäjiltä.

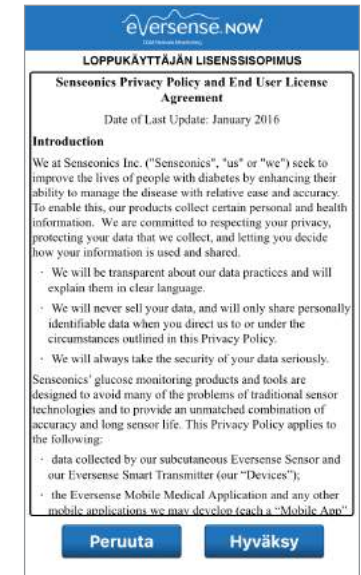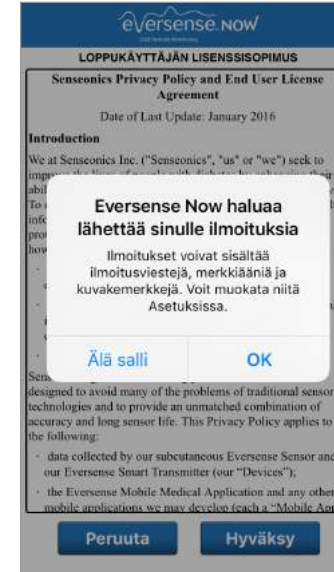

4. Luo Eversense-tili kirjautuaksesi sovellukseen.

Huom.: Jos sinulla on jo Eversense-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä voidaksesi käyttää Eversense NOW -sovellusta. Klikkaa linkkiä sähköpostikutsussa ja kirjaudu sisään Eversense-tiliisi. Kun päivität kotisivusi Eversense NOW -sovelluksessa, näet sen CGM-käyttäjän nimen, jonka kutsun hyväksyit.

5. Hyväksy loppukäyttäjän lisenssisopimus.
6. Valitse mittayksikkö. Valitsemaasi mittayksikköä sovelletaan kaikkiin Eversense CGM -käyttäjiin, joiden tietoja voit katsella. Et voi vaihtaa mittayksikköä, kun sovellus on asennettu.

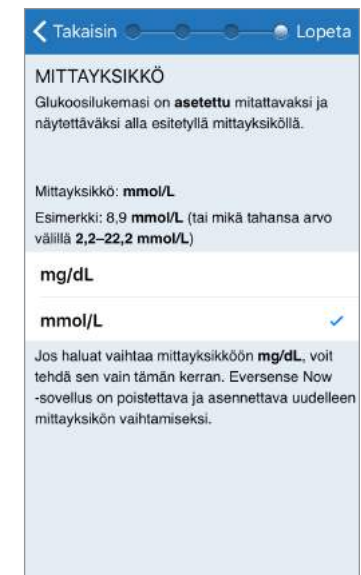

Eversense CGM -käyttäjän poistaminen omasta luettelosta

Jos poistat Eversense CGM -käyttäjän luettelostasi, et enää voi seurata hänen glukoositietojaan etänä. Jos haluat lisätä Eversense CGM -käyttäjän takaisin luettelosi, ota yhteys käyttäjään ja pyydä häntä lähettämään sinulle uusi kutsu.

1. Pyyhkäise Eversense CGM -järjestelmän käyttäjän nimeä vasemmalle kotisivulla.



2. Napauta ”Poista”.

Näkyviin tulee varoitus, jossa sinua pyydetään vahvistamaan, että haluat poistaa Eversense CGM -käyttäjän.

3. Napauta ”Kyllä”, jos haluat poistaa henkilön pysyvästi luettelostasi.

Käyttäjä ei enää näy kotisivusi luettelossa.


Huom.: Saattaa kulu kaksi tuntia ennen kuin Eversense CGM -käyttäjä näkee Eversense CGM -sovelluksestaan, että et enää kuulu hänen piiriinsä.

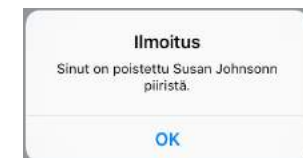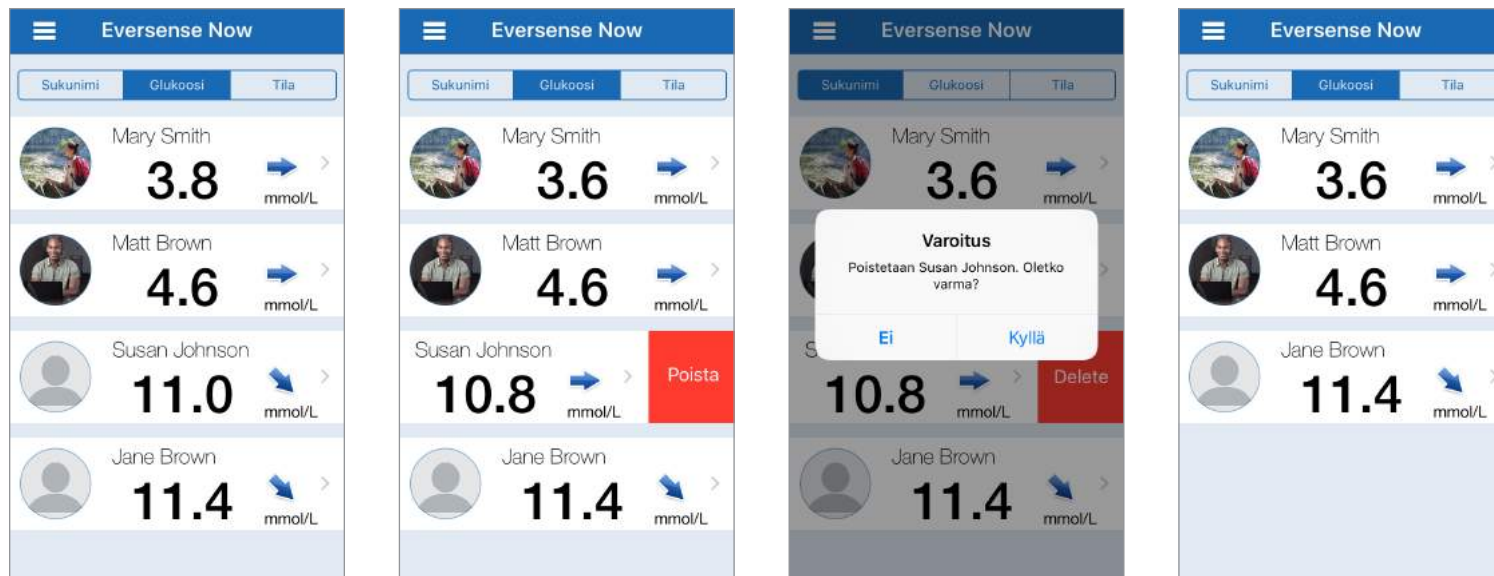

Huom.: Myös Eversense CGM -käyttäjä voi poistaa sinut omasta piiristään. Tässä tapauksessa näkyviin tulee tätä koskeva ilmoitus.


Päävalikko

Päävalikossa näkyvät vaihtoehdot Eversense NOW -kotisivulle, Tietoja-sivulle ja uloskirjautumissivulle siirtymistä varten.

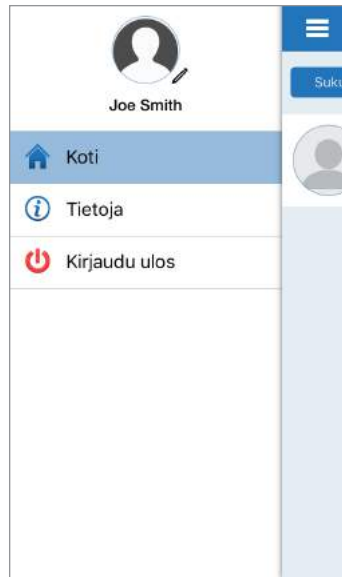

Voit siirtyä päävalikkoon napauttamalla kolmen palkin kuvaketta näytön vasemmassa yläkulmassa.

Koti

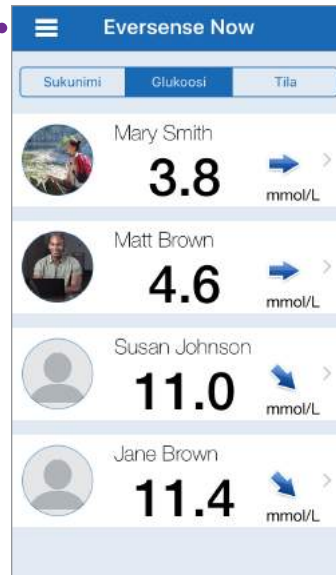


Päävalikosta voit siirtyä kotisivulle, jolla näet Eversense CGM -käyttäjien luettelosi, Tietoja-sivulle, jolla näkyvät Eversense NOW -sovelluksen tiedot tai uloskirjautumissivulle sovelluksesta ulos kirjautumista varten. Päävalikossa voit myös lisätä profiilikuvan.

Tietoja




Kirjaudu ulos

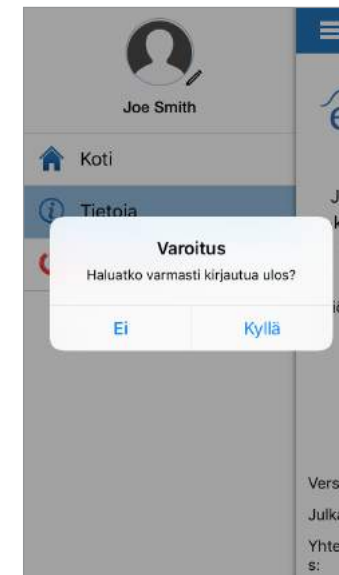

Eversense NOW pyytää sinulta vahvistuksen ennen uloskirjautumista. Jos kirjaudut ulos sovelluksesta, sinun on annettava käyttäjätunnuksesi ja salasanasasi sovelluksen avaamiseksi uudelleen.

Profiilikuvat

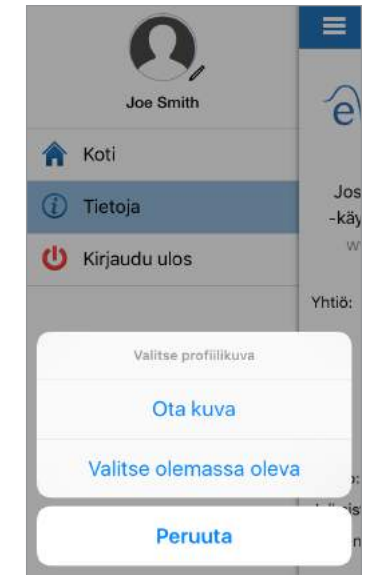

Voit lisätä profiilikuvan napauttamalla profiilikuvaa Eversense NOW -sovelluksen päävalikossa. Ota kuva tai lisää mobiililaitteeseesi tallennettu kuva noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita. Lisäämäsi profiilikuva näkyy myös CGM-käyttäjän sovelluksessa nimesi vieressä.

CGM-tietojen katseleminen

Kotisivulla näkyy luettelo henkilöistä, joiden CGM-tietoja voit katsella etänä, sekä kunkin henkilön kohdalla tämän viimeisin CGM-glukoosiarvo ja trendinuoli, joka osoittaa glukoositason muuttumissuunnan ja -nopeuden.

Luettelo on oletusarvoisesti sukunimien mukaisessa järjestyksessä. Voit järjestää luettelon sukunimien, glukoosiarvojen tai tilan mukaan klikkaamalla vastaavaa välilehteä sivun yläreunassa.

Eversense NOW -kotisivu


Kotisivun päivittäminen:

1. Avaa kotisivu.


2. Pyyhkäise alaspäin kotisivun keskiosasta (jos käytät iOS-laitetta ja pyyhkäiset aivan sivun yläreunasta, iOS:n widgetit tulevat näkyviin ja kotisivu ei päivity).

CGM-käyttäjältä saadut glukoositiedot päivittyvät Eversense NOW -sovelluksessasi automaattisesti noin viiden minuutin välein, jos sekä sinulla että CGM-käyttäjällä on internet-yhteys.


Tärkeä huomautus: Jos Eversense CGM -käyttäjä on poistanut automaattisen synkronoinnin käytöstä, hänen glukoositietojaan ei lähetetä automaattisesti Eversense NOW -sovellukseesi.

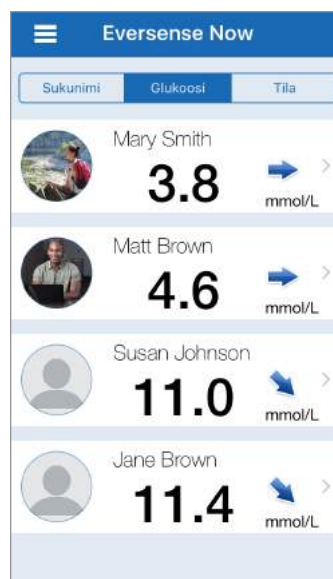

Kotisivu järjestettynä sukunimien mukaan

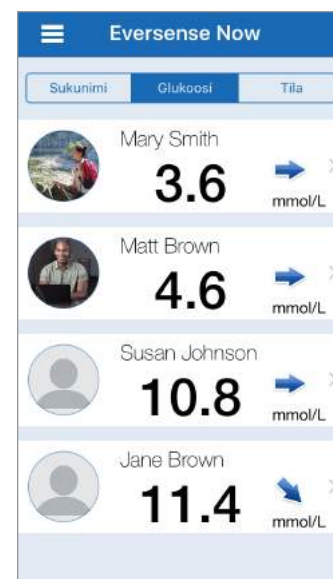

Kotisivu järjestettynä glukoosiarvojen mukaan

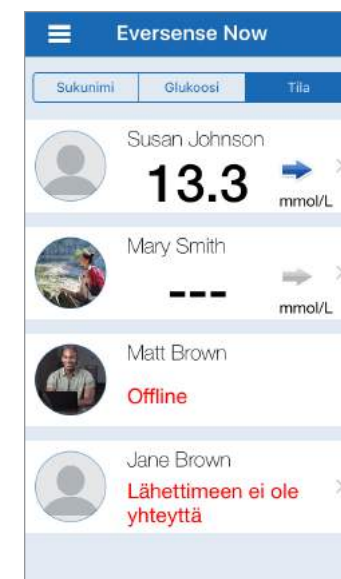

Kotisivu järjestettynä tilan mukaan

Trendinuolet

Näet trendinuolen CGM-käyttäjän nimen vieressä. Trendinuoli osoittaa glukoositason senhetkisen muuttumissuunnan ja muuttumisnopeuden.

Mobiilisovellus käyttää glukoositrendien laskemiseen **jatkuvan glukoosin seurannan tietoja viimeisten 20 minuutin ajalta.**

Jos sensorin arvoja ei ole riittävästi laskentaa varten, nuoli näkyy harmaana. ➡



Glukoositaso laskee tai nousee vähitellen 0,00–0,06 mmol/L:n minuuttinopeudella.



Glukoositaso nousee kohtuullisen nopeasti eli 0,06–0,11 mmol/L:n minuuttinopeudella.



Glukoositaso laskee kohtuullisen nopeasti eli 0,06–0,11 mmol/L:n minuuttinopeudella.




Glukoositaso nousee erittäin nopeasti eli yli 0,11 mmol/L:n minuuttinopeudella.



Glukoositaso laskee erittäin nopeasti eli yli 0,11 mmol/L:n minuuttinopeudella.

Tila

Eversense CGM -järjestelmän käyttäjän nimen vieressä voi näkyä neljä eri tilaa.

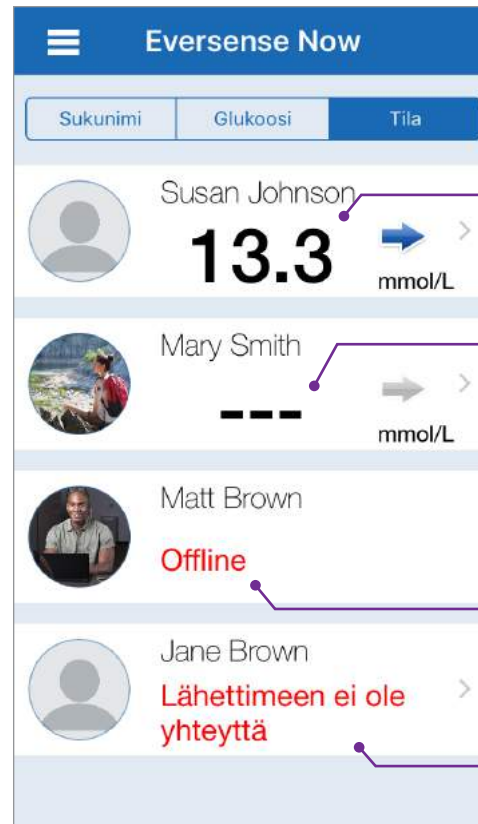

Viimeisin glukoosilukema

Käyttäjä vastaanottaa glukoositietoja aktiivisesti.

”---”

Käyttäjän älylähetin on liitetty, mutta se ei vastaanota glukoositietoja tai glukoositietoja ei ole riittävästi arvon näyttämiseksi.

Tämä voi johtua seuraavista syistä:

- CGM-järjestelmä on lämpenemisvaiheessa.
- CGM-käyttäjä on alustusvaiheessa, eikä ole vielä saanut ensimmäistä glukoosilukemaa.
- Käyttäjä on saanut varoituksen, joka estää glukoositietojen näyttämisen.

”Offline”

Käyttäjä on poistanut tietojen jakamisen kanssasi tilapäisesti pois käytöstä. (Saattaa kulua 10 minuuttia, kunnes tämä tilapäivitys tulee näkyviin Eversense NOW 0-sovelluksessasi.)

”Lähettimeen ei ole yhteyttä”


Älylähettimen ja Eversense CGM -sovelluksen välillä ei ole yhteyttä. Tämä voi johtua seuraavista syistä:

- Älylähettimen akku on ladattava tai se on latauksessa.
- Bluetooth- tai internet-yhteyttä ei ole tai mobiililaitte ei ole päällä.
- Älylähetin on kantaman ulkopuolella tai sen virta on katkaistu.
- CGM-käyttäjä on poistanut automaattisen synkronoinnin käytöstä.

Trendikaavio

Saat CGM-järjestelmän käyttäjän yksityiskohtaisemmat glukoositiedot näkyviin napauttamalla CGM-käyttäjän nimeä kotisivulla. Ensimmäisellä näytöllä näkyy trendikaavio käyttäjän sensorin glukoosiarvoista kolmen viimeisen tunnin ajalta. Trendinuoli osoittaa glukoositason muuttumissuunnan ja muuttumisnopeuden.

Voit päivittää näytön napauttamalla päivityskuvaketta .

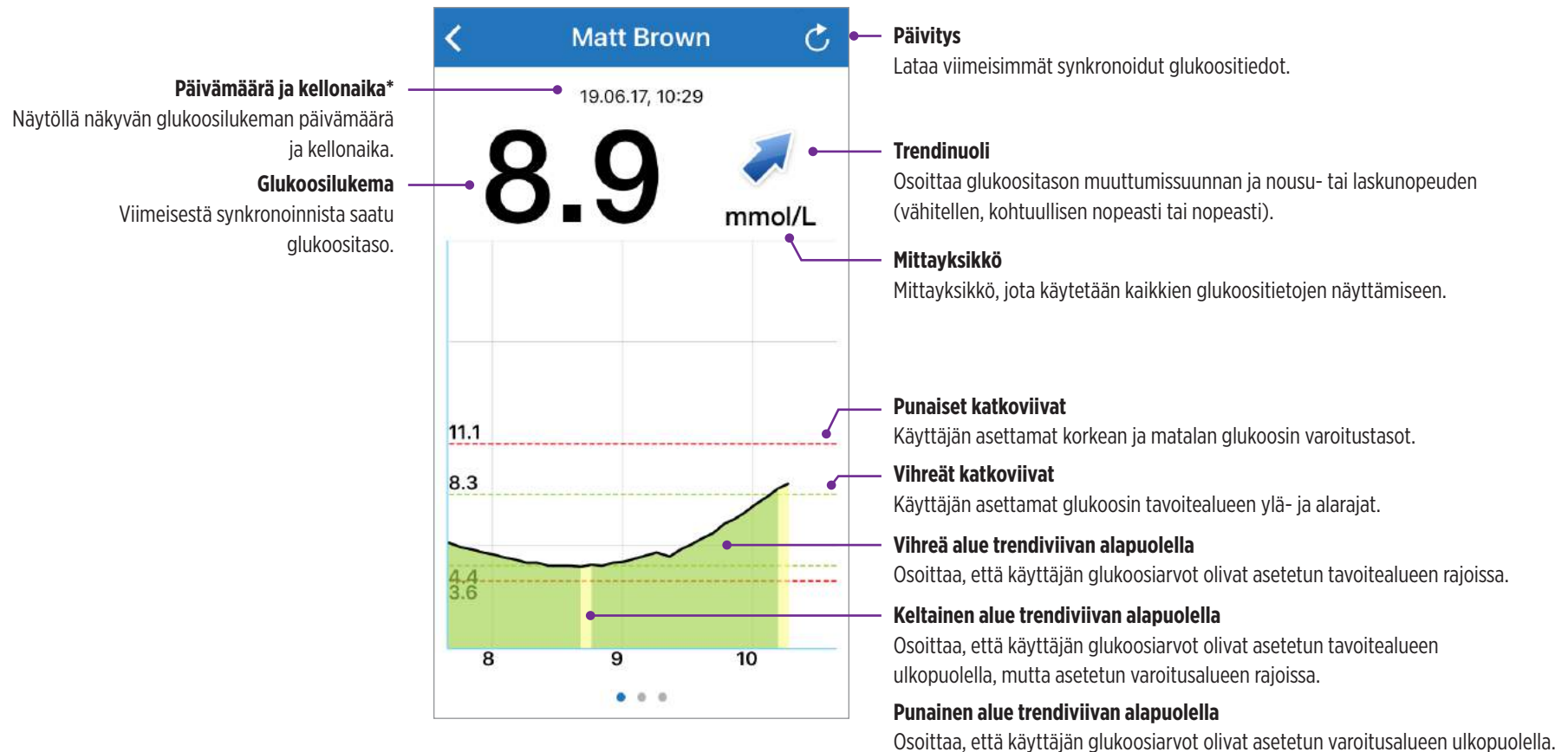

* Jos et saa uutta glukoosilukemaa viiden minuutin kuluttua viimeisimmästä glukoosiarvosta, päivämäärä ja kellonaika muuttuvat punaisiksi.




Eversense NOW -sovelluksen varoitukset

Kun Eversense CGM -käyttäjä saa glukoositasoon liittyvän varoituksen, myös hänen piiriinsä kuuluvat henkilöt saavat saman varoituksen Eversense NOW -sovelluksen kautta.


Varoitukset näkyvät neljällä tavalla: mobiililaitteen lukitusnäytöllä, ilmoituksena näytön yläreunassa, ponnahdusilmoituksena sovelluksessa sekä Apple Watch -laitteessa.

Varoitus: Eversense NOW -sovelluksessa näkyviä glukoositietoja ei saa käyttää hoitopäätösten perustana. Eversense NOW -sovellus on Eversense CGM -tietojen toissijainen näyttötapa. Sitä ei tule käyttää Eversense CGM -järjestelmän ensisijaisen näytön sijasta.


Huom.: Ilmoitusten peilauksessa täytyy olla otettu käyttöön Apple Watch -laitteen Eversense NOW -ilmoitusasetuksissa, jotta voit saada glukoosivaroituksia Apple Watch -laitteeseen.

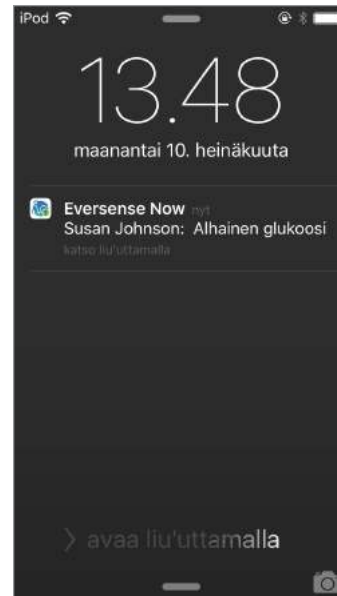


Varoitus lukitusnäytöllä

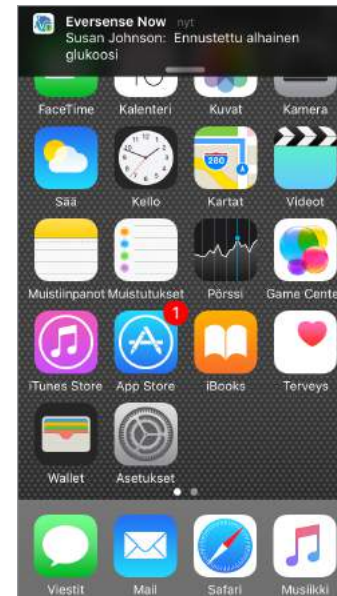

Varoitus ilmoituksena

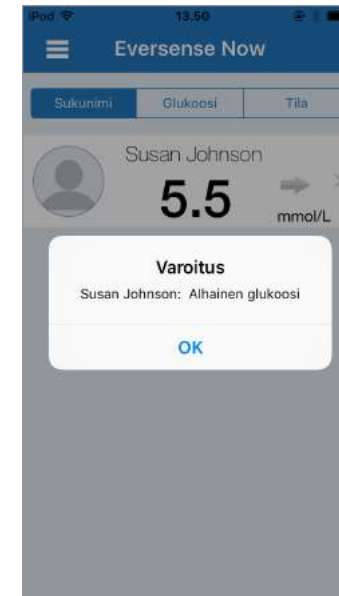

Varoitus ponnahdusilmoituksena sovelluksessa

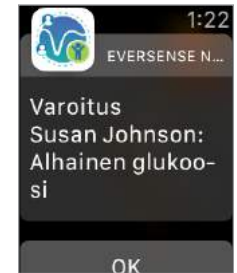

Varoitus Apple Watch -laitteessa

Varoitushistoria

Saat näkyviin Eversense CGM -järjestelmän käyttäjän glukoosivaroitusten varoitushistorian pyyhkäisemällä trendikaavionäyttöä vasemmalle.

Varoitushistoria-näytössä näkyvät viimeiset 20 glukoositasoon liittyvää varoitusta, jotka kyseinen käyttäjä on saanut Eversense CGM -sovelluksessaan.

Nämä varoitukset ilmoittavat glukoositasojen nopeasta noususta tai laskusta sekä matalista tai korkeista glukoosiarvoista (hypoglykemia tai hyperglykemia).

Huom.: Saat ennakoivia korkean ja matalan glukoositasoon liittyviä varoituksia ainoastaan, jos Eversense CGM -käyttäjä on ottanut ennakoivat varoitukset käyttöön.

Glukoosivaroitukset		
maanantaina, heinäkuuta 10, 2017		
Ennustettu matala glukoosi	13:38	
Laskemisnopeus	13:38	
Ennustettu korkea glukoosi	13:08	
sunnuntaina, heinäkuuta 09, 2017		
Korkea glukoosi	20:53	
Ennustettu korkea glukoosi	20:33	
Ennustettu matala glukoosi	18:23	
Laskemisnopeus	18:23	
Korkea glukoosi	13:28	
Ennustettu korkea alukoosi	13:08	

Tapahtumaloki

Saat näkyviin Eversense CGM -järjestelmän käyttäjän tapahtumalokin pyyhkäisemällä varoitushistorianäyttöä vasemmalle.


Tapahtumaloki sisältää luettelon 20 viimeisestä tapahtumasta, jotka CGM-käyttäjä on tallentanut lokiin. Tapahtumaloki näyttää Eversense CGM -käyttäjän syöttämät tiedot, kuten kalibrointeja, aterioita, liikuntaa, verensokeriarvoja, insuliinitasoja ja terveydentilaa koskevat tiedot. Jos käyttäjä ei ole syöttänyt mitään tietoja, loki on tyhjä.

Tapahtumaloki		
perjantaina, heinäkuuta 07, 2017		
Glukoosi, 100 mg/dL	11:32	
Kalibrointi, 100 mg/dL	11:32	
Ateria	11:24	
Kalibrointi, 79 mg/dL	08:02	
keskiviikkona, kesäkuuta 07, 2017		
Terveys	14:04	
keskiviikkona, marraskuuta 23, 20...		
Terveys	11:13	
Insuliini	11:13	
Ateria	11:12	



CGM Remote Monitoring

Bruksanvisning för mobilapp

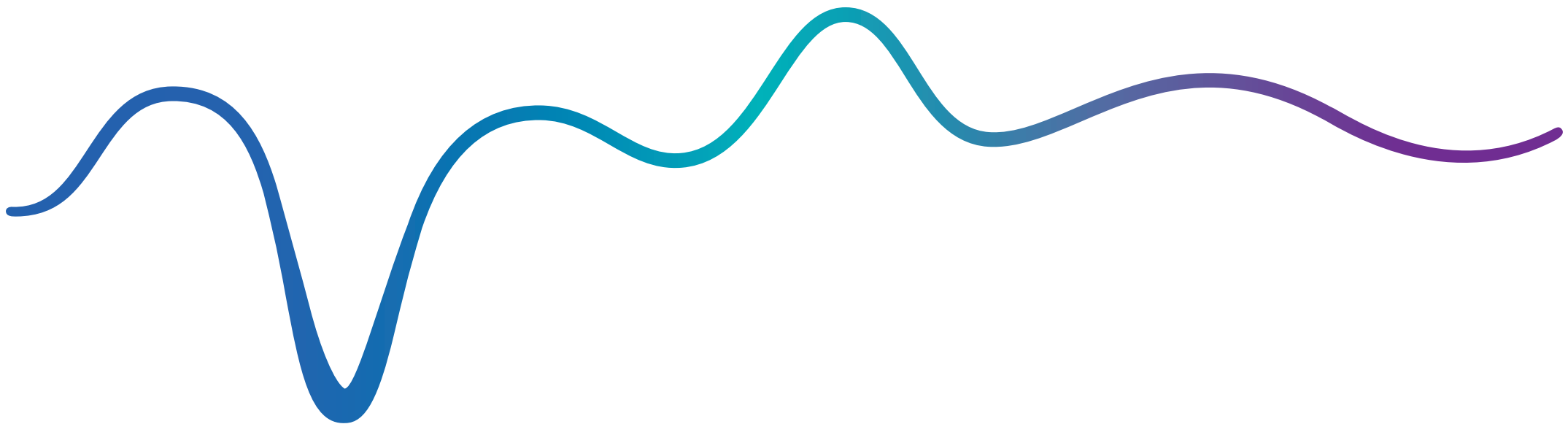

Bruksanvisning för Eversense NOW | **mmol/L**

Fjärrövervakning med Eversense CGM-system och Eversense NOW-app

Eversense CGM-app innehåller en valfri fjärrövervakningsfunktion. Med denna funktion kan Eversense CGM-data visas på en sekundär display via Eversense NOW-mobilappen.

Avsedd användning

Eversense NOW-appen är avsedd att användas som en sekundär display för att visa glukosdata och varningar från Eversense CGM-användare.

Kontraindikationer

Följ klinikens och övriga institutionens riktlinjer gällande användning av mobilenhet i närheten av MR, CT-skanningar och annan procedurutrustning.

Risker

Det kan finnas tillfällen då glukosdata inte kan skickas till Eversense NOW-appen. Om du inte tar emot glukosdata från Eversense CGM-användaren kan du inte hjälpa till vid högt eller lågt glukosvärde. Fjärrövervakningsfunktionen ger en sekundär visning av data. Det är inte ett fjärrövervakningssystem i realtid.

Eversense CGM-användare kanske inte alltid har tillgång till anslutning som stödjer dataöverföring, såsom internet/wifi eller 3G/4G/LTE. Om du eller Eversense CGM-användaren inte har tillgång till en internetanslutning blir glukosdata inte tillgängliga för visning. Eventuella problem med mobilenheter, trådlöst internet, dataanslutning, Eversense datahanteringssystem (DMS), CGM-användarens smartsändare utom räckhåll från mobilenheten eller laddning av smartsändaren kan medföra att data inte visas. Eversense-användaren bör inte förlita sig på att du övervakar glukosdata för att hjälpa till vid hög eller låg glukoshändelse.

Nytta

Eversense CGM-systemet som används med Eversense NOW fjärrövervakningsapp kan ge CGM-användarna extra trygghet eftersom de vet att andra också kan se deras CGM-data.

Varningar:

- Glukosinformation som visas på Eversense NOW-appen ska inte användas för att fatta beslut om behandling. Eversense NOW-appen är en sekundär visning av Eversense CGM-data och bör inte användas i stället för den primära Eversense CGM-visningen. Eversense CGM-användare bör alltid använda blodsockervärden från sin mätare för att fatta beslut om behandling. Om ett behandlingsbeslut tas utifrån sensorns glukosvärde kan det resultera i alltför hög eller låg blodsockernivå.
- Eversense CGM-användare bör inte förlita sig på dem som fjärrövervakar glukosvärdena för att meddela dem om höga eller låga glukoshändelser.

Var försiktig:

- Eversense NOW fjärrövervakningsapp ersätter inte en övervakningsregim från en vårdgivare.
- Om en Eversense CGM-användare inte har automatisk synkronisering (funktion som möjliggör att data skickas automatiskt till Eversense NOW-appen) kanske du inte ser höga eller låga glukostrender och -händelser.
- Om du och Eversense CGM-användarna inte har någon internetanslutning, eller om CGM-användarens mobilenhet har stängts av på grund av svagt batteri eller slut på batteriet, kan deras Eversense CGM-data inte visas på Eversense NOW-appen.
- Om du stänger av ljudet på mobilenheten får du inga hörbara varningar om CGM-data som du fjärrövervakar via din Eversense NOW-app.
- Om en CGM-användare ställer in sin status till offline får du inga CGM-data från den användaren i din Eversense NOW-app.
- Eversense NOW-appen kommunicerar inte direkt med Eversense-sensorn och/eller med Eversense-smartsändaren.
- Eversense NOW-appen kan inte ändra inställningarna på Eversense CGM-appen.
- Om du inte tillåter meddelanden från Eversense NOW-appen får du inte glukosrelaterade varningar från Eversense CGM-användare.
- Om du har din mobilenhet inställd på Stör ej kommer du inte höra några meddelanden från Eversense NOW-appen.

Använda Eversense NOW-appen

I denna bruksanvisning beskrivs hur man använder Eversense NOW-appen för att fjärrövervaka glukos hos användarna av Eversense CGM-system.

Tack för att du laddat ner Eversense NOW-mobilappen. Med Eversense NOW kan du fjärrövervaka glukosdata från användarna av Eversense CGM-system.

Var försiktig: Eversense NOW fjärrövervakningsapp ersätter inte den primära visningen på Eversense CGM-system-appen eller en övervakningsregim från en vårdgivare.

Systemkrav

- Eversense NOW-appen laddas ned till mobilenheten från Apple® App Store
- En kompatibel Apple® iPhone® eller iPod® eller iPad® (iOS version 8.0 eller senare)
- En lista över kompatibla enheter finns på www.eversenseddiabetes.com

Obs! En trådlös internetanslutning krävs för att ladda ned appen och för fjärrmottagning av glukosvärden att visas på Eversense NOW-appen. Om Eversense CGM-användaren har stängt av automatisk synkronisering visas inga glukosvärden på din Eversense NOW-app.

Licensavtal för slutanvändare och sekretesspolicy

Användning av Eversense NOW-appen är föremål för villkoren i det senaste Eversense NOW licensavtal för slutanvändare och Eversense NOW sekretesspolicy. Dessa dokument uppdateras regelbundet och finns tillgängliga på www.eversenseddiabetes.com.

Jailbreakade enheter

ANVÄND INTE Eversense-appar på en jailbreakad iPhone, iPad eller iPod. Jailbreakade enheter ger inte användaren godtagbara nivåer av säkerhet eller noggrannhet och är inte godkända för användning av Senseonics.

Hjälp och support

Om det är något du inte förstår i den här bruksanvisningen hittar du kontaktinformation till din lokala återförsäljare på baksidan.

Gå med i en Eversense-cirkel

Eversense-cirkeln hänvisar till den grupp personer som kan fjärrövervaka glukosdata och glukosrelaterade varningar från en Eversense CGM-användare. För att gå med i cirkeln måste du acceptera den e-postinbjudan du får från Eversense CGM-användaren, skapa ett konto på Eversense DMS-webbplatsen och ladda ned Eversense NOW-mobilappen.

Eversense DMS-programmet är en webbaserad applikation som är kompatibel med Eversense CGM-systemet för att visa historiska glukosdata och rapporter för att hjälpa till att identifiera glukostrender som ett hjälpmedel i diabeteshantering. Med Eversense DMS-programmet kan du dessutom skapa ett konto så att du kan fjärrvisa glukosdata med hjälp av Eversense NOW-appen. Du kan inte fjärrvisa glukosdata via Eversense DMS-programmet. Mer information om programmet Eversense DMS finns på www.eversensed diabetes.com.

Acceptera en inbjudan att gå med i en Eversense-cirkel

En Eversense-cirkel är den grupp personer som en Eversense CGM-användare har bjudit in att följa glukosdata och varningar på distans (i sina mobiltelefoner).

1. Du kommer att få en e-postinbjudan, "Begäran att visa glukosdata", om att gå med i en Eversense CGM-användares cirkel.

Obs! Om du förväntar dig en inbjudan och inte ser den i din inkorg, kolla dina spam-mapp eller skräp-mapp.

2. Klicka på länken i e-postmeddelandet.

3. Logga in på ditt Eversense-konto.

Obs! Med Eversense NOW-appen kan du gå med i maximalt 10 Eversense-cirklar. Om du får en inbjudan att gå med i en 11:e cirkel får du ett e-postmeddelande med uppmaningen att gå ur en befintlig cirkel innan du läggs till i en ny.




Ladda ned Eversense NOW-appen

1. Gå till Apple App Store och sök "Eversense NOW".
2. Tryck på ikonen Eversense NOW, ladda ned och installera appen till din smartenhet.
3. När du blir uppmanad trycker du på "OK" för att ta emot glukosrelaterade varningar från Eversense CGM-användare på din lista.




Var försiktig: Om du inte tillåter meddelanden från Eversense NOW-appen får du inga glukosrelaterade varningar från Eversense CGM-användare.

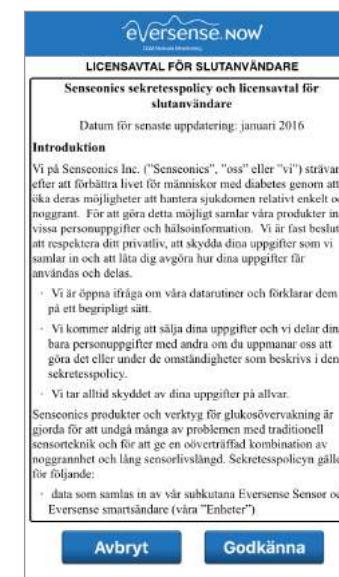

4. Skapa ett Eversense-konto för att logga in på appen.

Obs! Om du redan har ett Eversense-konto behöver du inte skapa ett nytt för att använda Eversense NOW. Klicka på länken i e-postinbjudan och logga in på ditt befintliga Eversense-konto. När du uppdaterar startsidan i din Eversense NOW-app kan du se namnet på den CGM-användare vars inbjudan du accepterat.

5. Godkänna licensavtalet för slutanvändare.
6. Välj måttenhet. Den måttenhet du väljer kommer att gälla för alla Eversense CGM-användare vars data du kan visa. Du kan inte ändra måttenhet när appen har installerats.

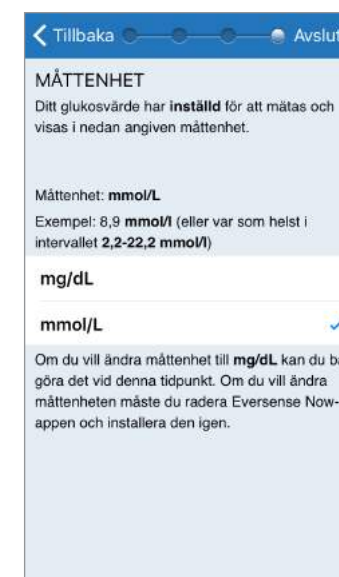

Ta bort en Eversense CGM-användare från din lista

Om du tar bort en Eversense CGM-användare från listan betyder det att du inte längre kan fjärrövervaka den användarens glukosdata. Om du vill få tillbaka användaren på din lista kontaktar du Eversense CGM-användaren och ber denne skicka en ny inbjudan.

1. Svep över Eversense CGM-systemanvändarens namn på startsidan till vänster.


2. Tryck på "Ta bort".

En varning kommer att be dig att bekräfta att du vill ta bort Eversense CGM-användaren.

3. Tryck på "Ja" för att permanent ta bort den här personen från din lista.

Startsidan visar inte längre användaren på din lista.


Obs! Det kan ta upp till 2 timmar för Eversense CGM-användaren att se i sin Eversense CGM-app att du inte längre är i dennes cirkel.

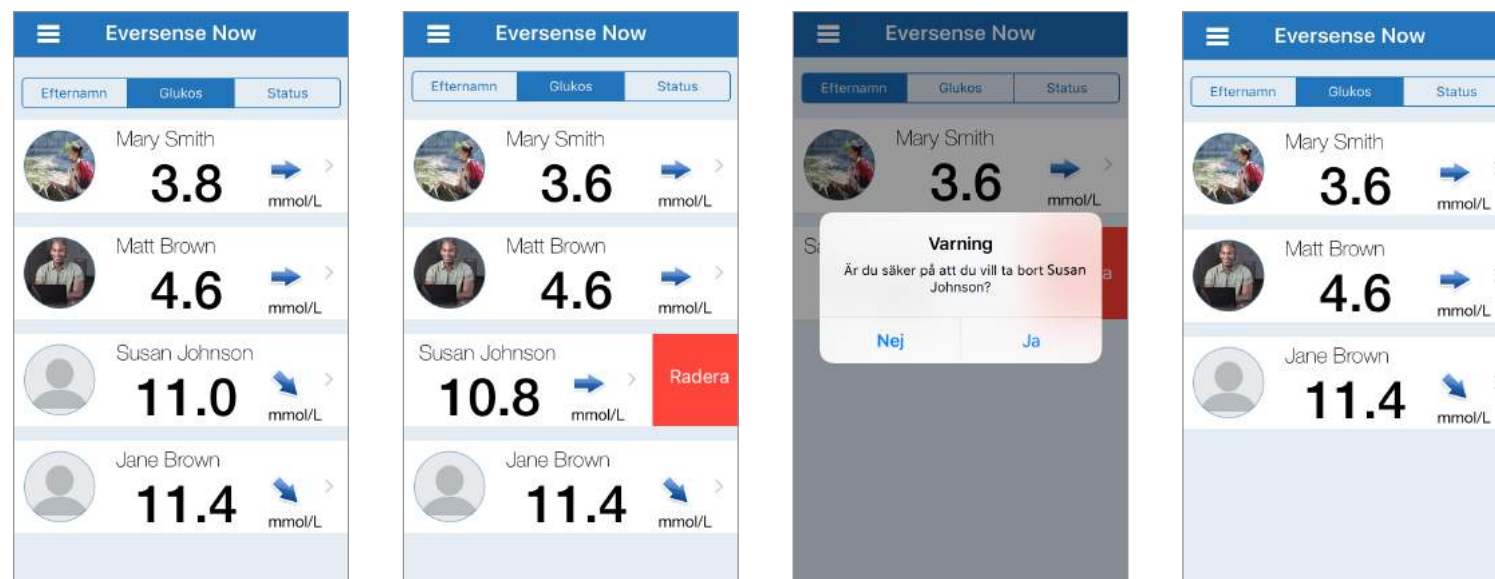

Obs! En Eversense CGM-användare kan också ta bort dig från sin cirkel. Om detta händer visas detta meddelande.


Huvudmeny

Huvudmenyn visar åtkomst till Eversense NOW-startsidan, Om-sidan och utloggningssidan.

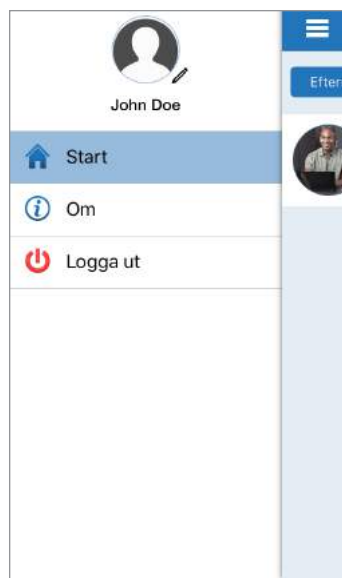

För att komma till huvudmenyn trycker du på ikonen med 3 rader längst upp till vänster på skärmen.

Start

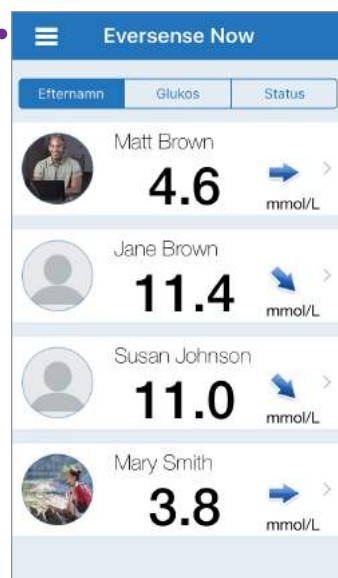


Om



Logga ut



Profilbilder

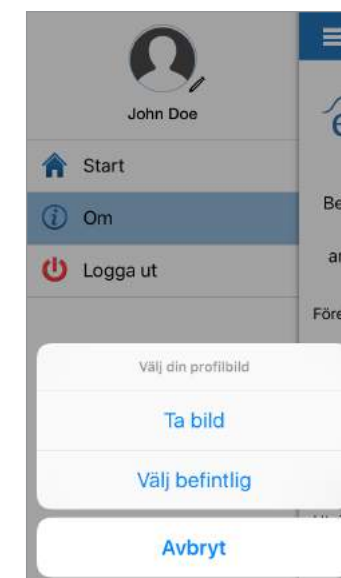

Från huvudmenyn kan du komma till startsidan för att se Eversense CGM-användare på din lista, granska information om Eversense NOW-appen på sidan Om, logga ut från appen eller lägga till en profilbild.

Eversense NOW uppmanar dig att bekräfta innan du loggar ut. Om du loggar ut från appen måste du ange ditt användarnamn och lösenord när du öppnar appen igen.

Du kan lägga till din profilbild genom att trycka på profilbilden i huvudmenyn i Eversense NOW-appen. Följ anvisningarna för att ta eller lägga till en bild från din mobilenhet. Profilbilden du lägger till kommer även att visas på CGM-användarens app bredvid ditt namn.

Visa CGM-data

Startsidan visar listan över personer vars CGM-data du kan se på avstånd, tillsammans med deras senaste CGM-värde och en trendpil som anger riktning och förändringshastighet.

Listan sorteras som standard efter efternamn. Du kan sortera listan efter efternamn, glukosvärde eller status genom att klicka på önskad flik högst upp på sidan.

Eversense NOW-startsidan


För att uppdatera startsidan:

1. Öppna startsidan.


2. Svep nedåt på startsidan (om du använder en iOS-enhet uppdateras inte startsidan när du sveper uppifrån skärmen, istället öppnas dina iOS-widjetar).

Glukosdata från CGM-användaren uppdateras automatiskt på din Eversense NOW-appen ungefär var 5:e minut när du och CGM-användaren har anslutning till internet.


Var försiktig: Om Eversense CGM-användaren har stängt av automatisk synkronisering skickas inga glukosdata automatiskt till din Eversense NOW-app.

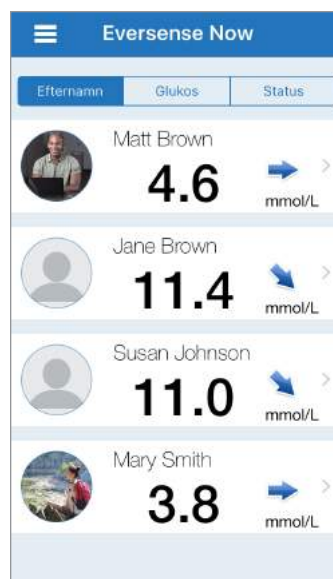

Startsidan sorterad efter efternamn

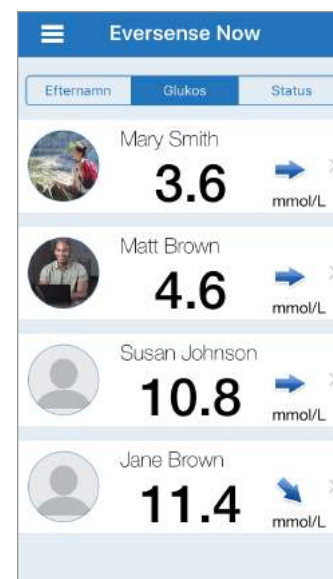

Startsidan sorterad efter glukosvärde

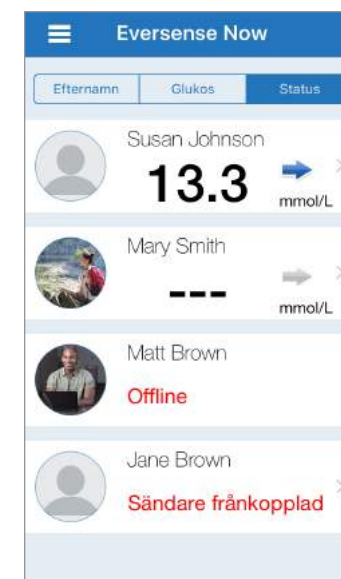

Startsidan sorterad efter status

Trendpilar


Bredvid Eversense CGM-användarens namn ser du en trendpil. Trendpilen visar glukosens nuvarande riktning och hur snabbt glukostrenden förändras.

Appen använder de **senaste 20 minuterna med kontinuerliga glukosdata** för att beräkna vilken pil som ska visas. När det inte finns tillräckligt med sensorvärden tillgängliga för beräkningen visas pilen i grått. ➡

➡	Gradvis stigande eller fallande glukosnivåer, som faller eller stiger i en takt mellan 0,00 mmol/L och 0,06 mmol/L per minut.
➡	Måttligt stigande glukosnivå, som stiger i en takt mellan 0,06 mmol/L och 0,11 mmol/L per minut.
➡	Måttligt fallande glukosnivåer, som faller i en takt mellan 0,06 mmol/L och 0,11 mmol/L per minut.
⬆	Mycket snabbt stigande glukosnivåer, som stiger i högre takt än 0,11 mmol/L per minut.
⬇	Mycket snabbt fallande glukosnivåer, som faller i högre takt än 0,11 mmol/L per minut.

Status

Det finns fyra olika statusförhållanden som du kan se bredvid en Eversense CGM-användarens namn.

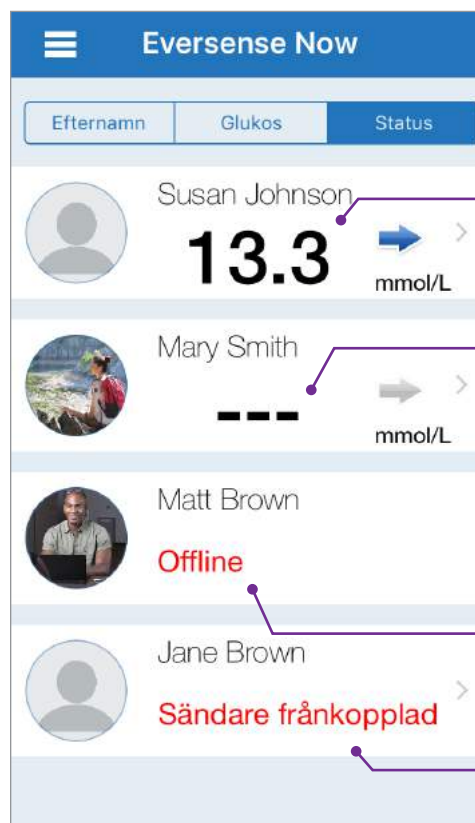

Senaste glukosavläsningen

Användaren tar aktivt emot glukosdata.

"---"

Användarens smartsändare är ansluten men tar för närvarande inte emot glukosdata eller så finns det inte tillräckligt med glukosdata för att visa ett värde.

Detta kan bero på:

- CGM-systemet befinner sig i uppvärmningsfasen.
- CGM-användaren befinner sig i initieringsfasen och har ännu inte tagit emot sin första glukosavläsning.
- Användaren har fått en varning som förhindrar att glukosdata visas.

"Offline"

Användaren har tillfälligt stängt av datadelning med dig. (Det kan ta upp till 10 minuter för denna statusuppdatering att visas i din Eversense NOW-app.)

"Sändare frånkopplad"


Det finns ingen anslutning mellan smartsändaren och Eversense CGM-appen. Detta kan bero på:

- Smartsändarens batteri måste laddas eller håller på att laddas.
- Bluetooth-anslutningen, internetanslutningen eller mobilenheten kan vara avstängd.
- Smartsändaren är utom räckvidd eller avstängd.
- CGM-användaren har stängt av automatisk synkronisering.

Trenddiagram

För att se mer detaljerad glukosinformation om en CGM-användare, tryck på en Eversense CGM-användares namn på startsidan. Den första skärmen visar ett trenddiagram över användarens sensorglukosvärden under de senaste tre timmarna. Trendpilen visar vilken riktning nuvarande glukos rör sig i samt hur snabbt glukostrenden förändras.

För att uppdatera skärmen trycker du på uppdateringsikonen .

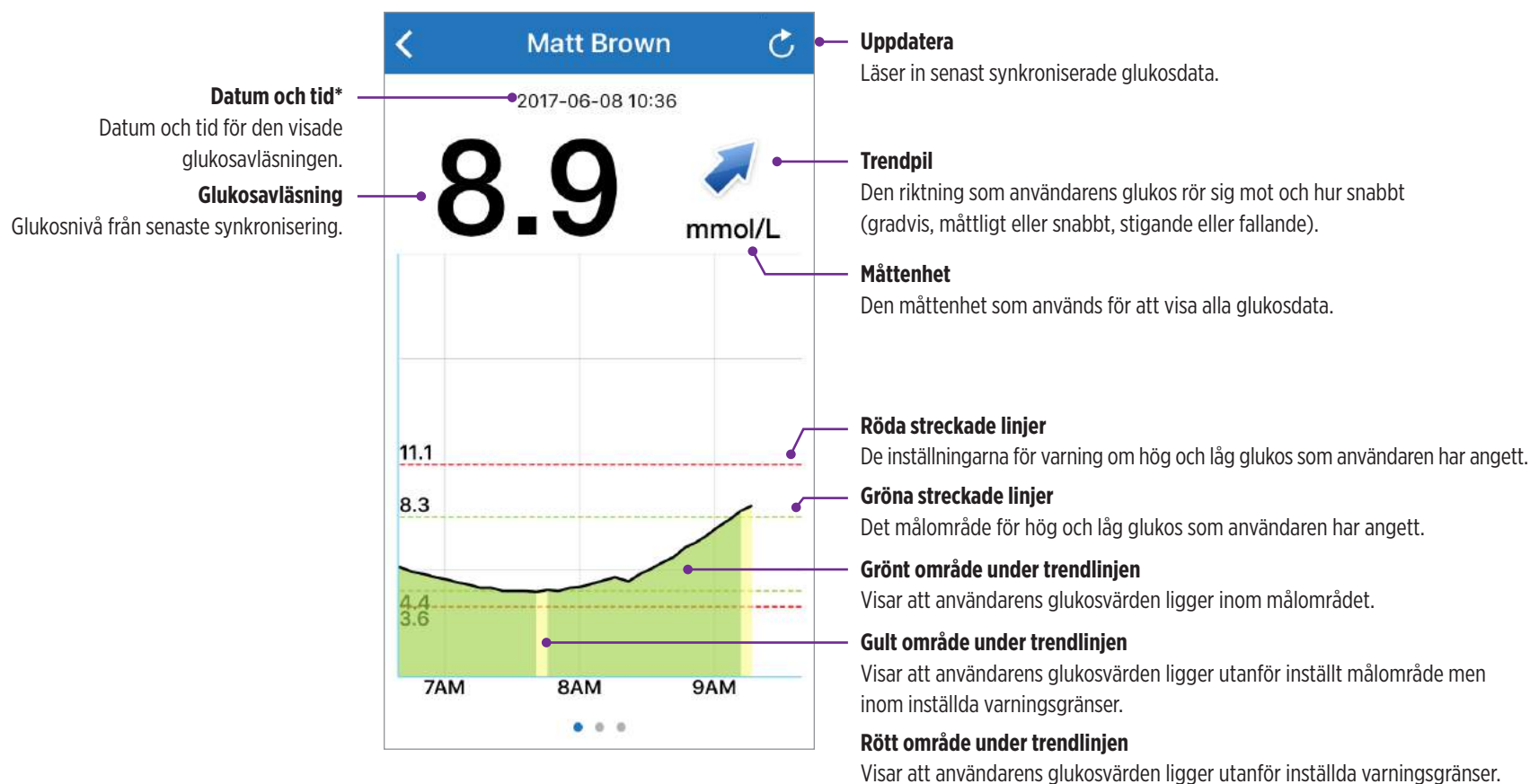

* Om du inte får någon ny glukosavläsning inom 5 minuter efter det senaste glukosvärdet kommer datum och tid att visas i rött.




Eversense NOW-varningar

När en Eversense CGM-användare får en glukosrelaterad varning får även den användarens medlemmar samma varning i sin Eversense NOW-app.


Dessa varningar visas på ett av fyra sätt: På din låsskärm, som ett meddelande högst upp på skärmen, som en pop-up via app eller på en Apple Watch.

Varning: Glukosinformation som visas på Eversense NOW-appen ska inte användas för att fatta beslut om behandling. Eversense NOW-appen är en sekundär visning av Eversense CGM-data och bör inte användas i stället för den primära Eversense CGM-visningen.


Obs! Meddelandespeglning måste vara aktiverad i dina Apple Watch-meddelandeinställningar för Eversense NOW för att få glukosvarningar på din Apple Watch.

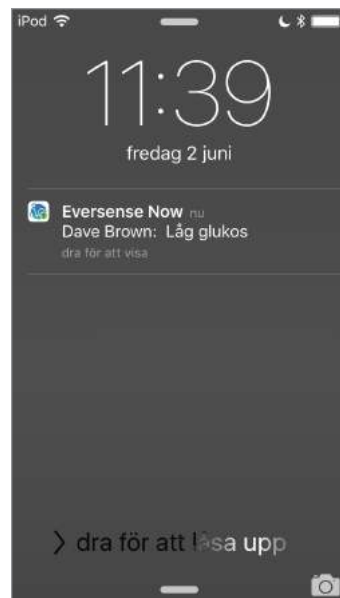


Varning: låsskärm

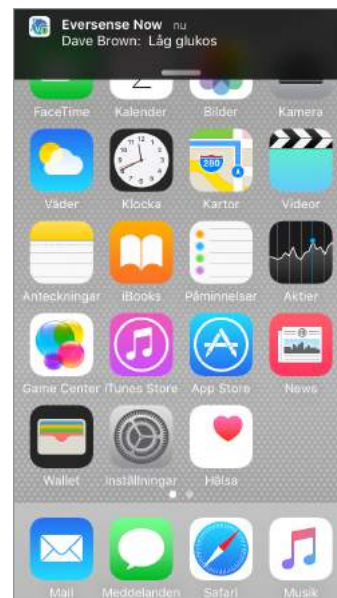

Varning: meddelande

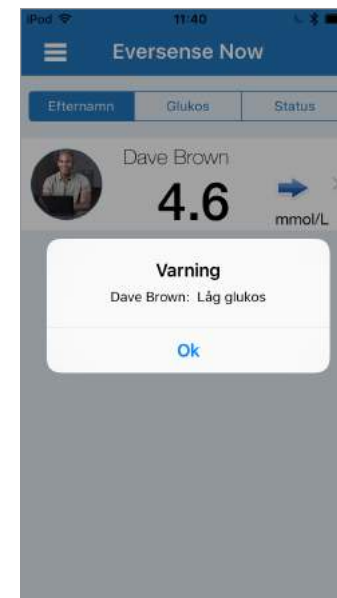

Varning: pop-up via app

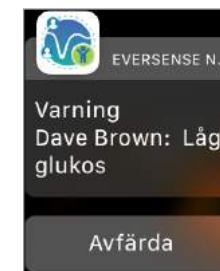

Varning: på Apple Watch

Varningshistorik

Svep skärmen till vänster från trenddiagrammet om du vill se Eversense CGM-systemanvändarens glukosvarningshistorik.

På skärmen **Varningshistorik** visas de senaste 20 glukosrelaterade varningarna som användaren fått i sin Eversense CGM-app.

Dessa varningar övervakar händelser som stigande eller fallande glukostakt samt låga eller höga glukosvärden (hypoglykemi eller hyperglykemi).

Obs! Du får endast förutsägande höga och låga glukosvarningar om Eversense CGM-användaren har aktiverat förutsägande varningar.

Glukosvarningar	
torsdag, juni 01, 2017	
Låg glukos	16:46
Låg glukos	07:25
Förväntat lågt glukos	06:55
Låg glukos	01:10
Förväntat lågt glukos	00:45
onsdag, maj 31, 2017	
Låg glukos	17:34
Förväntat lågt glukos	17:24
Låg glukos	16:04
Låg glukos	15:49

Händelselogg


Svep skärmen till vänster från varningshistoriken om du vill se Eversense CGM-systemanvändarens händelselogg.

Händelseloggen visar de 20 senaste händelserna som CGM-användaren loggat. Händelseloggen visar information som Eversense CGM-användare har angett, till exempel kalibreringar, måltider, träning, blodsockervärden, insulinnivåer, hälsa och motion. Loggen är tom om användaren inte har angett några händelser.

Händelselogg	
fredag, juni 02, 2017	
Motion	10:13
Kalibrering, 5.5 mmol/L	09:14
Måltid	09:07
Kalibrering, 5.5 mmol/L	08:44
Glukos, 5.2 mmol/L	08:37
Kalibrering, 4.4 mmol/L	08:02
torsdag, juni 01, 2017	
Insulin	21:47
Måltid	19:10
Kalibrering, 8.4 mmol/L	18:02

Jälleenmyyjä:
Pharmanova Oy
Linnankoskenkatu 32
06100 Porvoo
Finland
www.pharmanova.fi



 Manufactured by Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
844.SENSE4U | 301.515.7260
(844.736.7348)

eversensediabates.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands



(241) LBL-0307-11-101 B